

Bedienungsanleitung zu korrekten Handhabung der SAFO®



1. Öffnen Sie den Klettverschluß Ihrer neuen SAFO®.



2. Öffnen Sie Ihre neue SAFO® vollständig.



3. Halten Sie die Öffnungen fest und geben Sie etwas Pflegepulver auf die Innenseite der SAFO®. Dies erleichtert das Anziehen.



4. Verreiben Sie das Pflegepulver gleichmäßig mit der Hand auf der Innenseite der Orthese.



5. Ziehen Sie Ihre neue SAFO® über den Fuß und stellen Sie dabei das Knöchelgelenk in 90 Grad Winkelstellung.



6. Schließen Sie die Klettverschlüsse Ihrer neuen SAFO® so, dass keine Falten zwischen dem Silikon und Ihrer Haut verbleiben. Versichern Sie sich, dass die SAFO bündig und ohne Einschnitte auf der Haut abschließt. Der vordere Rand Ihrer SAFO® sollte auf Höhe des Großzehengrundgelenks sein.



7. Sobald Sie Ihren Schuh angezogen haben, stellen Sie Ihr Knöchelgelenk wieder in 90 Grad Winkelstellung, bevor Sie den Schuh verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihre SAFO® keine Falten im Fersenbereich aufweist. Nun ist Ihre SAFO® korrekt angezogen.

Romedis GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 5a 83115 Neubeuern
Tel: 08035/ 96 78 78 96 Fax: 08035/ 96 78 78 97
E-mail: info@romedis.de

GMBH
ROMEDIS

