

SAFO Go™

Silikon-Knöchel-Fuß-Orthesen, die mitwachsen



ROMEDIS GMBH

Georg-Wiesböck-Ring 5a · 83115 Neubeuern
Tel +49(0)8035/967878-96 · Fax +49(0)8035/967878-97
info@romedis.de · www.romedis.de



Der Weg zur neuen Mobilität

Die Silikon-Knöchel-Fuß-Orthese SAFO ist eine komfortable Alternative zur starren Knöchel-Fuß-Orthese aus Kunststoff. SAFO Go™, die neue Generation der SAFO-Reihe, ist eine Orthese, die „mitwächst“ und sich der Entwicklung des Kindes anpasst. Sie ist individuell regulierbar und sorgt für eine angenehme und wirkungsvolle Unterstützung der Mobilität bei Patienten mit Fußheberschwäche.

Die SAFO Go™ korrigiert das Gehen, verbessert das Gleichgewicht, verhindert Stolpern und führt so zu einem

sicheren Gangbild. Vollständig aus Silikon individuell auf den Fuß eingestellt, ist auch die Gefahr von Druckstellen bedeutend vermindert. Das Silikon ist hautfreundlich und stützt sanft das Anheben des Fußes, sowie die Fußspitze während der Schwungphase des Gehens.

Durch die Silikon-Knöchel-Fuß-Orthese kann einem krankheitsbedingten teilweisen oder völligen Verlust der Bewegung am Fuß entgegengewirkt und Mobilität zurückgegeben werden.

Vorteile der SAFO Go™

Die SAFO Go™ wird anhand der Schuhgröße des Kindes bestimmt und kann individuell dem Wachstum des Kindes angepasst werden.

- erlaubt ‚normale‘ Fußgelenk-Bewegungen, ein normaler Bewegungsablauf ist möglich
- durch Studien nachgewiesene Verbesserung der Gehgeschwindigkeit und Ausdauer
- verbesserte Kontrolle des Gleichgewichts, sicheres Gangbild
- reduzierte Gefahr von Druckstellen, hautschonend
- kann mit oder ohne Schuh sowie beim Schwimmen oder Duschen getragen werden
- einfache Anpassung, Reinigung und Pflege
- liegt dezent am Bein an
- verbesserte sensorische Rückmeldung

Eine komfortable und attraktive Alternative zu traditionellen Kunststoff-Orthesen.



SAFO Go™ Anpassung/Gebrauch

1. Wählen Sie die Größe der SAFO Go™, die dem Fuß des Patienten entspricht.



2. Stellen Sie den Fuß planar, die Dorsalflexion einhaltend, auf den Boden und passen Sie die SAFO Go™ am Fuß an. Das Vorderteil am Bein anlegen und die SAFO Go™ mit dem Klettverschluss schließen. Dank der neuen Orthographie!



3. Den Fuß in der Dorsalflexion halten, das Fußteil überlappend schließen, so dass der Fuß gut umschlossen ist. Mit einem Stift das Silikon an der Überlappung markieren.



4. Die SAFO Go™ vom Fuß des Patienten entfernen und mit den mitgelieferten Reinigungstüchern säubern. Den Silikon-Kleber dünn auf die vorher markierten und überlappenden Stellen auftragen.



5. Die Enden mit den mitgelieferten Clips fest verschließen und mit dem Heißluftfön ca. 2-3 Minuten gleichmäßig bearbeiten. Anschließend fest zusammen drücken, bis der Kleber richtig schließt. Bevor die SAFO Go™ angelegt wird, muss sichergestellt werden, dass das Silikon fest verklebt und überschüssiger Klebstoff von der Vorrichtung entfernt ist.



6. Die Orthese an den Fuß des Patienten anpassen. Die SAFO Go™ kann zwecks besserer Passform an der Ferse und im Zehenbereich zugeschnitten werden; den Fuß hierfür herausnehmen.

7. Um einen abgeschlossenen Klebevorgang zu generieren, bitte erst nach 24 Stunden tragen.